



1931 Norman Drive Waukegan
IL 60085, USA
www.mabis.net


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MODEL: NEW MABIS HEALTHCARE

1. CÁC NÉT CƠ BẢN VỀ MÁY XÔNG KHÍ DUNG

- * Cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm máy xông khí dung của chúng tôi trước khi sử dụng thiết bị xin quý khách lưu ý đọc kỹ những hướng dẫn để khỏi gặp phải một trong những sự cố đáng tiếc xảy ra.
- * Khí dung trị liệu là một phương pháp điều trị bằng cách đưa thuốc trực tiếp vào niêm mạc đường hô hấp, do cơ chế này thuốc sẽ đọng lại trên niêm mạc đường hô hấp, nên liệu pháp xông khí dung chỉ cần dùng liều thuốc thấp, thời gian đạt hiệu quả nhanh và giảm tối thiểu về phản ứng phụ do thuốc gây nên.

2. MÔ TẢ THIẾT BỊ

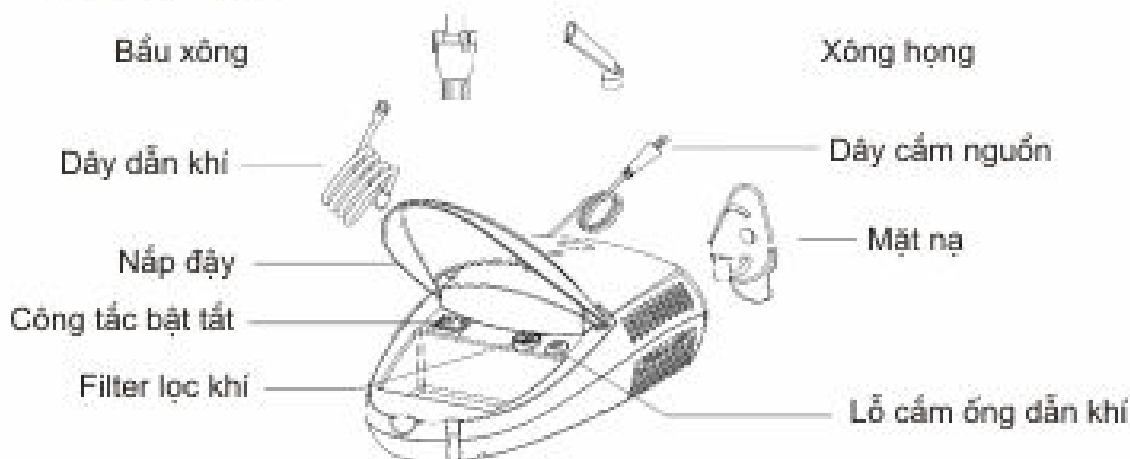


3. MÁY XÔNG KHÍ DUNG LÝ TƯỞNG ĐỂ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ SAU:

- Viêm họng.
- Viêm xoang.
- Viêm mũi dị ứng và rối loạn đường hô hấp.
- Hen suyễn, viêm phổi.
- * Đặc biệt dùng rất có hiệu quả đối với trẻ em.

4. THAO TÁC SỬ DỤNG MÁY:

- Đặt máy Xông khí dung trên bàn (hay đặt trên một mặt phẳng cố định).
- Lấy phích cắm ở khoang phía sau máy và cắm vào ổ điện (lưu ý công tắc phải đang ở chế độ tắt "0")
- Các linh kiện của bộ xông khí dung:
 - * Cốc chứa thuốc:
 - + Vận phần trên của cốc thuốc bằng cách quay ngược chiều kim đồng hồ, cho thuốc vào cốc chứa, lượng thuốc cần phải phù hợp với lời khuyên của Bác sĩ. Nhưng không vượt quá ký hiệu "Max" (tối đa) trong cốc chứa thuốc hướng dẫn.
 - + Nối phần trên của cốc chứa thuốc vào lại vị trí cũ
 - * Ống dẫn khí:
 - Một đầu cắm vào ống dẫn khí của thân máy, đầu còn lại cắm vào cốc chứa thuốc.
 - * Lắp ống ngậm, ống mũi, (thông qua ống nối) hay mặt nạ vào phần trên của bộ xông khí dung.
 - * Hoàn chỉnh các thao tác trên bạn có thể bật nút "I" cho máy hoạt động.

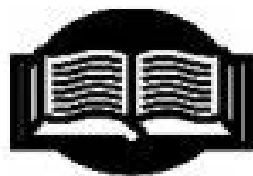

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

5. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI XÔNG THUỐC:

- Nên chọn cho mình 1 tư thế ngồi thẳng và thoải mái khi đang xông thuốc, nhằm tránh trường hợp đường hô hấp của bạn bị co lại tạo cho việc xông hơi thuốc không đạt kết quả tốt. Nếu như phải điều trị tại giường hãy kê gối để tạo thành 1 tư thế ngồi thẳng

- Nên tham vấn ý kiến của Bác sĩ về lượng thuốc và thời gian thích hợp cho việc xông thuốc.

6. BẢO QUẢN VÀ VỆ SINH MÁY:

* Khi sử dụng máy xông khí dung, mỗi người nên sử dụng một bộ xông khí dung riêng. Nên thay thế bộ phận này hàng năm.

* Nên tiết trùng sau mỗi lần sử dụng bằng cách:

+ Tháo rời các bộ phận xông khí dung (ống ngậm, ống mũi, mặt nạ, ống nối) ngâm vào nước ấm (30phút). Sau đó đặt tất cả lên giấy thấm sạch và để khô.

+ Nếu ống dẫn khí có hơi ẩm đọng lại, hãy nối một đầu ống dẫn với thân máy và để hở đầu kia. Sau đó, bật máy để thổi khô ống dẫn.

+ Lau thân máy bằng vải ẩm.

** Lưu ý: Khi sử dụng

- Không được nhúng máy xông khí dung trong nước.

- Không được để máy hoạt động không, phải tắt máy khi không sử dụng.

- Giữ máy trong môi trường thoáng mát.

- Không được sử dụng máy khi có hỗn hợp thuốc gây mê vì hỗn hợp này rất dễ cháy khi tiếp xúc với không khí.

- Máy sau mỗi lần sử dụng nên để cách nhau 10 phút để nâng cao tuổi thọ của máy.

